

非滅菌

N95微粒子マスク 折りたたみ式

- ✓ 高い密閉度
- ✓ 油分を含まない空気中の個体・液体エアロゾルに対し95%以上を除去する効果



製品概要

品名：マスク（N95ヘルスケア）

対象：医療用

カラー：緑

規格：GB19083-2010、CE基準合格

価格：¥14,000(税抜)

性能：粒子捕集効率：≥95%


呼吸抵抗：≤60Pa

血液不浸透性：≥160mmHg

製造元：Manufactured by BYD Precision Manufacture Co., Ltd.

住所：No. 3001 Baohe Road, Baolong Industrial City, Longgang, Shenzhen, China

製品詳細

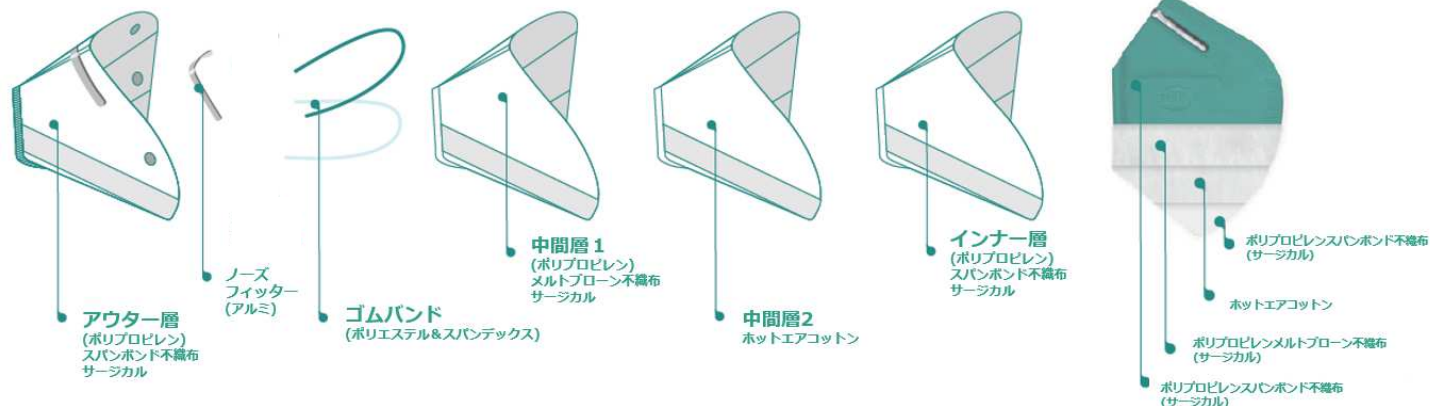

非滅菌

N95微粒子マスク 折りたたみ式

梱包仕様

1袋：1枚
1箱：20枚

着用方法



- ①鼻あてを上にしてマスクがあごを包むようにかぶせて下さい。
- ②上側のゴムバンドを頭頂部近くにかけて、下側のゴムバンドを首の後ろにかけて下さい。
- ③両手で鼻あてを押さえながら、指先で押さえつけるようし、鼻あてを鼻の形に合わせて下さい。
- ④両手でマスク全体を覆い、息を強く出し空気が漏れていないか確認して下さい。

使用上の注意

- 1.マスク着用により、病気や感染症にかかるリスクを完全に排除されるものではありません。
- 2.不適切な使用により感染及びその他人体に悪影響が出る可能性があります。
- 3.開封後は、すぐに使用して下さい。
- 4.マスクの内側に手を触れないで下さい。
- 5.直射日光の当たる場所を避けて、保管して下さい。火気及び汚染された場所から避けて保管して下さい。
- 6.温度-20℃～38℃（-4°F～100°F）、相対湿度80%未満で保管して下さい。
- 7.有効期限が切れている場合は、マスクを使用しないで下さい。
（有効期限：製造日より2年間）
- 8.仕様済のマスクは規定に従って適切に処分して下さい。
- 9.パッケージが破損している場合は使用しないで下さい。
- 10.マスクの損傷、汚染を発見した場合、呼吸が困難になる場合、新しいマスクを交換して取り付けて下さい。

製品番号

DE2322

免責事項

当社が事業の損失、利益の損失または損害、または弊社が提供する情報への依存に起因する間接的、特別、偶発的、または結果的な損失または損害に対して責任を負いかねます。

お問い合わせ先 株式会社セルミック

SELMIC

〒525-0032滋賀県草津市大路1-1-1エルティくさつ4階

TEL:077-516-4755 FAX:077-516-4756